

ETHYLEC+

éthylotest électronique à cellule électrochimique

MODÈLE DÉBLOQUÉ

2 options d'affichage des résultats :

■ ■ de 0 à 1 mg/L d'air expiré ou 🇪🇺 de 0 à 2 ‰



Composition de la mallette

- 1 Ethylotest électronique « ETHYLEC+ »
- 10 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour
- 1 Pile 9V alcaline
- 1 Prise allume-cigare DC 12V adaptateur Jack
- 1 Pochette de rangement avec dragonne de transport
- 1 Notice d'utilisation

Présentation du produit

ETHYLEC+ est équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à une cellule électrochimique.

AUTO-DEPISTAGE

=

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION

Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool ne conduisez pas



Caractéristiques techniques

- Cellule ELECTROCHIMIQUE
- Préchauffage : 15 secondes
- Temps de souffle : 7 à 8 secondes
- Puissance souffle : 10 L/min
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L
- Affichage des mesures :
 - 0,00 à 1 mg/L (■ ■) affichage « HI » au-delà de cette mesure.
 - Seuil d'alarme sonore 0,25 mg/L
 - 0,00 à 2 ‰ (🇪🇺) affichage « HI » au-delà de cette mesure.
 - Seuil d'alarme sonore 0,50 ‰

- Stockage et utilisation du produit : de 0°C à 50°C
- Compteur de test avec alarme de ré-étalonnage
- Calibrage préconisé : de 12 à 14 mois
- Détection de la pression et de l'interruption du souffle
- Dimensions : 115 x 60 x 23 mm
- Poids : 105 g sans pile
- Temps du test : moins de 60 secondes
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD
- Alimentation : pile 9V ou adaptateur 12V
- Indicateur de batteries faibles


› Descriptif du produit

ETHYLEC+

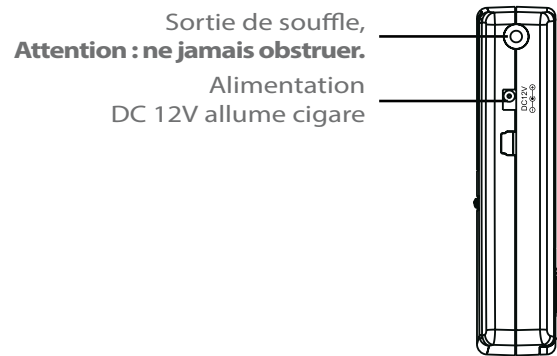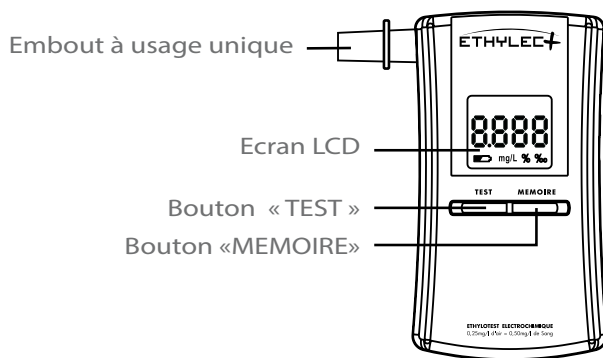


› Mode d'emploi


- Insérer un embout buccal sur le capteur (attention changer d'embout à chaque utilisation).

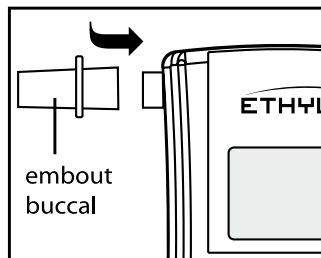


- Appuyer et maintenir le bouton «TEST». Relâcher une fois l'appareil allumé.

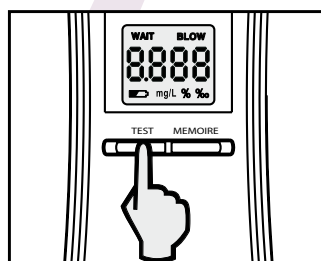


- Le mot «WAIT» (patienter) s'affiche sur l'écran et le compte à rebours se met en marche de 15 à 0.

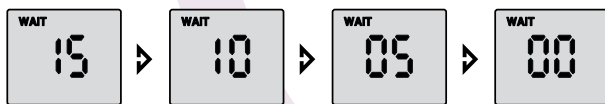


- Après le compte à rebours, le mot «BLOW» (souffler) s'affiche et la lettre « C » défile. Inspirer et souffler dans l'embout jusqu'à l'arrêt du BIP sonore (environ 6 à 8 secondes).

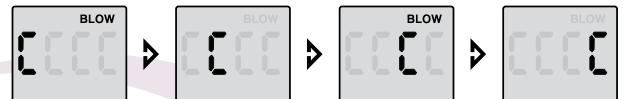

- Le mot «WAIT» apparaît puis le chiffre « 0 » défile, l'appareil calcule alors votre taux d'alcool.

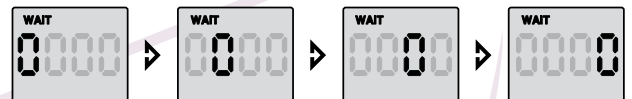

- Le résultat de votre test apparaît sur l'écran. Au delà de 1 mg/L ou 2 ‰ l'appareil affiche «HI».

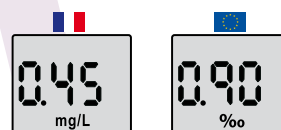


- L'appareil peut afficher «Err» (erreur) si le souffle n'a pas été correct.



› Mode mémoire

Après vous être testé, l'appareil affiche votre résultat pendant 20 secondes. Pendant ce laps de temps, vous pouvez appuyer sur le bouton «MEMOIRE» pour vérifier vos résultats précédents. Le bouton «MEMOIRE» n'est disponible que pendant ces 20 secondes. Attendre 30 secondes après le dernier test pour refaire un nouveau test.

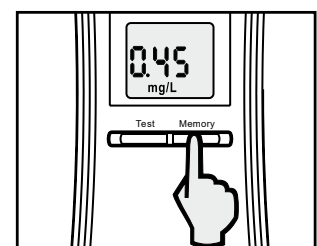

 Les résultats obtenus ne sont pas opposables à ceux des forces de l'ordre