ethyway éthylotest électronique SPECIAL JEUNE CONDUCTEUR - Permis probatoire Capteur électrochimique - Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704



Composition du coffret

- 1 Ethylotest électronique « ETHYWAY »
- 5 Embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour
- 2 Piles AAA 1,5V alcalines + 2 piles de rechange
- 1 Pochette de rangement

Alarme sonore + fond d'écran rouge dès 0,10 mg/L atteint



Présentation du produit

ETHYWAY est équipé d'un capteur électrochimique, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats. Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l'ETHYWAY vous permet à tout moment de contrôler votre taux d'alcool.

AUTO-DEPISTAGE

PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION

Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool ne conduisez pas

Caractéristiques techniques

- Capteur ELECTROCHIMIQUE
- Préchauffage : 10 secondes
- Temps de souffle : 7 à 8 secondes
- Puissance souffle: 10 L/min
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/LAffichage des mesures : 0,00 à 0,49 mg/L,
- message «HI» au dessus
- Rappel:

Seuil contraventionnel 0,25 mg/L Alarme sonore + fond d'écran rouge si seuil atteint.

0,10 mg/L modèle Jeune Conducteur


• Utilisation : 10°C - 40°C • Stockage: 0°C - 50°C


- Compteur de test avec alarme de ré-étalonnage
- Calibrage : 12 mois ou 500 tests au premier terme échu
- Détection de la pression et de l'interruption du souffle
- Temps du test : moins de 60 secondes
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD
- Alimentation: 2 Piles AAA 1,5V alcalines
- Piles pour 500 tests environ
- Indicateur de batteries faibles








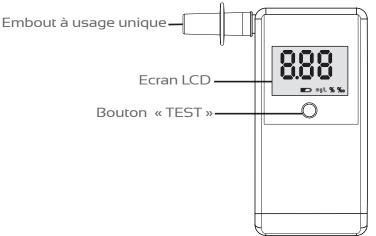

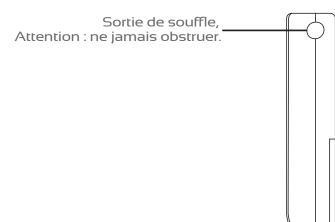


Mode d'emploi

Insérer un embout buccal sur le capteur (attention changer d'embout à chaque utilisation).

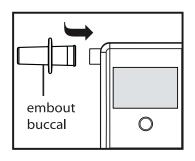

Appuyer et maintenir le bouton «TEST». Relâcher une fois l'appareil allumé.

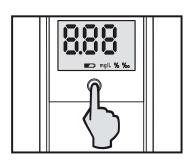

Le mot «WAIT» (patienter) s'affiche sur l'écran et le compte à rebours se met en marche de 10 a 0.



Après le compte à rebours, le mot «BLOW» (souffler) s'affiche et la lettre « [» défile. Inspirer et souffler dans l'embout jusqu'à l'arrêt du BIP sonore (environ 7 à 8 secondes).





Le mot «WAIT» apparaît puis le chiffre « 🗓 » défile, l'appareil calcule alors votre taux d'alcool.



Le résultat de votre test apparaît sur l'écran. Si le résultat dépasse 0,49mg/l le mot « HI » s'affiche.



Rappel:

Seuil contraventionnel permis probatoire 0,10 mg/L - Alarme sonore + fond d'écran rouge si seuil atteint.



L'appareil peut afficher «Err» (erreur) si le souffle n'a pas été correct Se référer au tableau d'affichage écran.



Les résultats obtenus ne sont pas opposables à ceux des forces de l'ordre



